



## Інструкція про застосування КОМПЛЕМЕНТ СУХИЙ (Complementum siccum)

**СКЛАД:** Комплемент сухий є ліофілізованою сироваткою морських свинок. Препарат має вигляд таблетки рожевувато-сірого кольору.

**ФОРМА ВИПУСКУ:** В ампулах.

**Код АТС:** V04CX.

**БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:** Здатність адсорбуватися на комплексі антиген + антитіло.

**ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ:** Компонент реакції зв'язування комплементу (РЗК).

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І ДОЗИ:** До кожної ампули сухого комплементу додають 1 мл 0,9 % розчину натрію хлориду. Термін розчинення не повинен перевищувати 2 хвилини. Розчинений препарат повинен бути прозорим, світло-жовтого або слабо рожевого кольору, без пластівців та осаду, строк його зберігання при температурі від 2 до 8 °С не повинен перевищувати 8 годин. Визначення робочої дози комплементу та проведення реакції зв'язування комплементу здійснюють згідно інструкціям щодо застосування відповідних діагностичних препаратів.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 2 до 8 °С. Транспортувати усіма видами критого транспорту при температурі від 2 до 8 °С.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:** 3 роки.

**ПАКУВАННЯ:** У пачках по 10 ампул.

**ВИРОБНИК:** ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК».

Адреса: Україна, Харківська обл., місто Харків, Помірки, тел/факс (057) 704-87-34, office@biolik.com.ua.

Рекламації на препарат направляти підприємству-виробнику.