



Інструкція про застосування СИРОВАТКА ДІАГНОСТИЧНА ГЕМОЛІТИЧНА РІДКА (Serum Haemoliticum pro diagnosi)

СКЛАД: Сироватка гемолітична є сироваткою кролів, імунізованих еритроцитами барана.

ФОРМА ВИПУСКУ: В ампулах по 2 мл рідкого препарату.

Код АТС: V04CX.

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ: Діагностична цінність препарату зумовлена здатністю гемолізувати еритроцити барана в присутності комплементу в реакції антиген-антитіло. Сироватка рідка, повинна бути прозорою світло-жовтого або світло-рожевого кольору. У разі довготривалого зберігання на поверхні рідкої сироватки іноді утворюється плівка або пристінне білувате кільце, яке не є перешкодою до подальшого застосування препарату.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

Компонент реакції зв'язування комплементу (РЗК).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І ДОЗИ: Сироватка розводиться згідно з титром, зазначеним на ампулі та на пачці та збільшеним в 3-4 рази. Наприклад: для приготування гемолітичної системи з сироваткою, яка має титр 1:3000, беруть 0,2 мл сироватки, консервованої гліцерином, та 99,8 мл 0,9 % розчину натрію хлориду.

Постановка реакції зв'язування комплементу (РЗК) здійснюється відповідно до «Інструкції про застосування» відповідних діагностичних препаратів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 2 до 8 °С. Транспортувати будь-яким видом критого транспорту.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки.

ПАКУВАННЯ: У пачках по 10 ампул.

ВИРОБНИК: ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК».

Адреса: Україна, Харківська обл., місто Харків, Помірки,
тел/факс (057) 704-87-34, office@biolik.com.ua.

Рекламації на препарат направляти підприємству-виробнику.