



Інструкція із застосування медичного виробу «АЛЬВІЛ спрей»

Уважно прочитайте цю інструкцію перед початком застосування, та не викидайте її до повного використання виробу.

ТОРГОВА НАЗВА: АЛЬВІЛ спрей.

СКЛАД

Лецитин із соєвих бобів, натрію хлорид, спирт етиловий (96 %), вода для ін'єкцій.

ОПИС

Напівпрозора опалесцююча рідина молочного кольору з характерним запахом. В процесі зберігання допускається поява осаду.

ФОРМА ВИПУСКУ

Спрей. По 50 мл (ml) у флаконах скляних зі спрей-насосом та насадкою-розпилювачем; по 1 флакону разом з інструкцією із застосування у пачці з картоном.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

АЛЬВІЛ спрей – це медичний виріб, механізм дії якого заснований на здатності його компонентів підтримувати необхідний рівень зволоження природної плівки, яка покриває слизові оболонки дихальних шляхів.

Він не порушує функціональний стан органів та систем організму, не містить консервантів, не має кумулятивних властивостей, не чинить фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

АЛЬВІЛ спрей показаний:

- як допоміжний засіб у складі комплексної терапії для полегшення симптомів та профілактики гострих або хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів;
- для підтримки природного рівня зволоження слизових оболонок органів дихання при подразненні дихальних шляхів;
- при охриплості, перенапруженні голосу спричинених інфекціями верхніх дихальних шляхів, сильним голосовим навантаженням та подразниками навколишнього середовища (пил, сухе повітря).

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів медичного виробу.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

З метою уникнення поширення інфекції не рекомендується користуватися однією й тією ж насадкою кільком особам.

Одразу після застосування насадку обробити ватним тампоном, змоченим у 70° розчині етилового спирту або іншого антисептика.

Пацієнтам, які раніше відчували утруднення дихання з будь-яких причин, **АЛЬВІЛ спрей** слід застосовувати лише після консультації з лікарем.

У разі виникнення побічних реакцій слід негайно припинити використання виробу та за необхідністю звернутися до лікаря.

АЛЬВІЛ спрей не має обмежень щодо застосування під час вагітності й годування груддю, але краще перед початком використання проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.

Застосування у дітей: не застосовувати дітям віком до 3-х років.

Використання дітьми повинно здійснюватися під наглядом дорослих.

З метою уникнення мікробного забруднення та для збереження цілісності упаковки, а також для запобігання травмуванню, забороняється відкручувати спрей-насос та розбирати знімні деталі (насадку-розпилювач).

Не використовувати виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не змішувати з іншими розчинами або лікарськими засобами.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед початком застосування слід порадитися з лікарем.

Використовуйте виріб тільки відповідно до цієї інструкції із застосування.

Перед використанням флакон добре збовтати.

При першому використанні для заповнення трубки насоса може знадобитися від 3 до 4 натискань на насадку розпилювач.

Застосування у вигляді спрею орального.

Тримати флакон вертикально і повністю натиснути на насадку розпилювач вниз.

Уникати прямого контакту між слизовою оболонкою порожнини рота і насадкою розпилювачем.

Щоб утворений аерозоль міг досягти гортані (наприклад, у разі охриплості), під час розпилення спрею слід вдихати довгим, рівномірним вдихом.

Зробити 2-4 натискання на насадку розпилювач 1-3 рази на день.

Застосування у вигляді розчину для інгаляцій.

Виріб може бути рекомендований лікарем у складі комплексної терапії захворювань верхніх дихальних шляхів за допомогою небулайзера з використанням спеціальної маски на обличчя або загубника.

Небулайзер необхідно використовувати відповідно до інструкції із застосування виробника.

На кожен інгаляційний курс рекомендовано вводити приблизно від 2 мл (ml) до 3 мл (ml) виробу. Загалом рекомендовано від 2 до 4 застосувань на день. Доза, тривалість та частота застосування визначається лікарем. Застосування може починатися з мінімальної дози та за потреби доза може бути збільшена.

Розпиляти **АЛЬВІЛ спрей** безпосередньо у готовий до використання небулайзер:

- 17 розпилювань відповідають приблизно 2 мл (ml);

- 25 розпилювань відповідають приблизно 3 мл (ml).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів розчину можливі алергічні реакції.

В окремих випадках можлива поява тимчасового подразнення (наприклад, кашлю) або оборотного утруднення дихання, особливо у пацієнтів із гіперреактивною бронхіальною системою (підвищена чутливість і подразнення дихальних шляхів, після вдихання холодного або вологого повітря, сигаретного диму, парфумів тощо), зокрема при бронхіальній астмі. У цьому випадку слід негайно припинити інгаляцію та звернутися до лікаря, якщо симптоми не зникають.

Не використовуйте без консультації лікаря, якщо ви схильні до задишки або гіперчутливості.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

У захищеному від світла місці при температурі від 2 °C до 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Транспортувати всіма видами критого транспорту при температурі від 2 °C до 25 °C.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки. Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

ВИРОБНИК

ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки, будинок 70

Адреса місця провадження діяльності:

Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки-70, будинок б/н

www.biolik.com.ua

У разі будь-якого серйозного інциденту, який трапився з виробом, або виникнення побічних реакцій при використанні виробу, просимо повідомляти виробнику будь-яким способом зв'язку: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки, будинок 70 або e-mail: office@biolik.com.ua

При порушенні споживачем встановлених виробником умов зберігання та транспортування повідомлення розглядаються як необрунтовані.

ПОЯСНЕННЯ ДО СИМВОЛІВ



«Виробник»



«Медичний виріб»



«Температурне обмеження»



«Код партії»



«Дата виготовлення»



«Використати до»



«Користуйтеся інструкцією із застосування»



«Попередження»

«Національний знак відповідності»

(UA - умовне позначення України латинськими літерами;

TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки

відповідності призначено на виконання робіт з оцінки

відповідності вимогам технічних регламентів;

YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки

відповідності)



«Не використовувати при пошкодженні упаковки»

Дата останнього перегляду: 16.05.2024