



# Інструкція із застосування Сироватка кінська нормальна для бактеріологічних поживних середовищ

## СКЛАД

Сироватка кінська нормальна.

## ОПИС

Рідина жовтого кольору без ознак гемолізу. При зберіганні допускається наявність осаду, який розбивається при струшуванні.

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Компонент бактеріологічних поживних середовищ, які застосовуються для культивування мікроорганізмів (коринебактерій, нейсерій, стрептококів тощо) при діагностиці відповідних інфекцій.

## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для використання *in vitro* в клініко-діагностичних лабораторіях.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Сироватка кінська нормальна біологічно безпечна та призначена для діагностики *in vitro*. Однак під час приготування бактеріологічних поживних середовищ спеціально навчений персонал повинен дотримуватися наступних правил:

- не піпетувати розчини ротом;
- при роботі використовувати спецодяг та одноразові гумові рукавички, а також ретельно мити руки після роботи;
- утилізацію або знищення відходів після роботи слід проводити відповідно до державних правил і норм, що регламентують їх утилізацію або знищення.

## ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ:

- не використовувати після закінчення терміну придатності;
- при роботі використовувати одноразові піпетки.

## СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Сироватка додається в поживні середовища відповідно до їх рецептури. У разі потреби сироватку перед введенням в поживні середовища інактивують при 56 °C протягом 30 хвилин.

## ФОРМА ВИПУСКУ

По 100 мл (ml) у флаконах, по одному флакону разом з інструкцією із застосування пакують у пачку з картону.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

У захищеному від світла місці при температурі від 2 °C до 8 °C.

Транспортування – всіма видами критого транспорту при температурі від 2 °С до 8 °С.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:** 1 рік.

## **ВИРОБНИК**

ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»

*Місцезнаходження юридичної особи:*

Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки, будинок 70

*Адреса місця провадження діяльності:*

Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки-70, будинок б/н  
www.biolik.com.ua

*Рекламації щодо якості виробу надсилати на адресу виробника:  
Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки, будинок 70  
або e-mail: office@biolik.com.ua*

*У випадку порушення встановлених виробником умов зберігання, транспортування та методики проведення аналізу з вини споживача рекламації розглядаються як необґрунтовані.*

## **ПОЯСНЕННЯ ДО СИМВОЛІВ**



«Виробник»



«Медичний виріб для діагностики *in vitro*»



«Температурне обмеження»



«Код партії»



«Стерилізація із застосуванням методів асептичного оброблення»



«Дата виготовлення»



«Використати до»



«Користуйтеся інструкцією із застосування»



«Не використовувати при пошкодженні упаковки»



«Національний знак відповідності»

Дата останнього перегляду: 20.06.2024